



NUMUNE KABUL TALİMATI

Doküman/Bölüm No:	VKMAE. T.05.ARI
Yayın Tarihi:	20.05.2004
Rev.Tarihi/No:	31.01.2014/06
Sayfa/Top.Sayfa:	1/2

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı ve kapsamı, Numune Kabulü, Dağıtımı ve Muhafazası Prosedürü (VKMAE.Pr.09)'nde belirtilmiştir.

2. SORUMLULUKLAR

İlgili sorumluluklar Numune Kabulü, Dağıtımı ve Muhafazası Prosedürü (VKMAE.Pr.09)'nde tanımlanmıştır.

3. UYGULAMALAR

Arı Hastalıkları Laboratuvarına gelen her türlü materyal, muayeneye alınmadan önce, laboratuvar şartlarında muayeneyi yapacak kişi (ler) tarafından ilgili SOP' larda belirtildiği şekilde tüm koruyucu tedbirler alınır.

3.1. Arı Numunesi: Hastalıklı koloniden yaklaşık 100-150 adet kadar arı (tercihen alındığında canlı), ağzı kapalı temiz bir kavanoz içerisinde ve en kısa sürede,

3.2. Petek Numunesi: Petek örnekleri 10 x 10 cm. ebatında tahta / strafor kutu içerisinde ve en kısa sürede gönderilmiş olmalıdır.

NOT: Laboratuvara getirilen/gönderilen her numunenin ilgili kayıtları eksiksiz ve anlaşılır olmalıdır. Enstitüye Arı Hastalıkları yönünden muayene için getirilen / gönderilen materyaller, Numune Kabul ve Raporlama Şefliği'nden Arı Hastalıkları Laboratuvarına orijinal ambalajı içinde gönderilir.

Arı Hastalıkları Laboratuvarına getirilen/gönderilen numuneler muayene bitiminde, bu numunelerden hazırlanan (tespit edilmiş/boyanmış) preparatlar, %70'lik alkol içerisinde ya da uygun bir saklama solüsyonu içerisinde daha uzun süre muhafaza edilebilen numuneler ise rapor sonucunun gönderilmesinden 5 gün sonra Atık Kontrol Prosedüründe (VKMAE Pr.21) belirtildiği şekilde imha edilirler. Kalıcı preparat haline getirilen ve alkol içine alınan numuneler imha edilene kadar oda ısısında muhafaza edilirler.

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR/ KAYNAKLAR VE EKLER

VKMAE Pr.03 Kayıtların Kontrolü ve Arşiv Prosedürü

VKMAE Pr.09 Numune Kabulü, Dağıtımı ve Muhafazası Prosedürü

VKMAE Pr.21 Atık Kontrol Prosedürü

Hazırlayan
ARI HASTALIKLARI
LAB. ŞEFİ

Kontrol Eden
KYBB

Onaylayan
ENSTİTÜ MÜDÜRÜ



NUMUNE KABUL TALİMATI

Doküman/Bölüm No:	VKMAE. T.05.ARI
Yayın Tarihi:	20.05.2004
Rev.Tarihi/No:	31.01.2014/06
Sayfa/Top.Sayfa:	2/2

5.KAYIT KONTROL

İlgili tüm kayıtlar Kayıtların Kontrolü ve Arşiv Prosedürüne (VKMAE Pr.03) göre saklanır.

6. DAĞITIM

Bu talimatın orijinali Kalite İzleme Biriminde, kontrollü kopyaları ise Arı Hastalıkları Laboratuvarında ve Numune Kabul ve Raporlama Şefliğinde bulunur.

7. REVİZYON

Revizyon No	Tarih	Revizyon Yapılan Madde	Revizyon Nedeni
01	21.02.2005	1,2	Düzeltilme
02	02.12.2008	3.8. ve 6.	Numunelerin saklama sürelerinde ve dağıtımda revizyon
03	16.04.2009	Genel	EMVKAE Pr.01' e göre güncelleme
04	14.02.2012	Genel	Enstitü isminde yapılan değişiklik nedeniyle doküman kodlarının değişmesi
05	30.04.2013	3.	Numunelerin imha edilinceye kadar saklama koşullarının eklenmesi
06	31.01.2014	Tüm doküman	Logo değişikliği

Hazırlayan
ARI HASTALIKLARI
LAB. ŞEFİ

Kontrol Eden
KYBB

Onaylayan
ENSTİTÜ MÜDÜRÜ