



NUMUNE KABUL TALİMATI

Doküman/Bölüm No:	VKMAE. T.05. GEN
Yayın Tarihi:	03.01.2006
Rev.Tarihi/No:	23.01.2014/05
Sayfa/Top.Sayfa:	1/3

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı, Numune Kabulü, Dağıtımı ve Muhafazası Prosedürü (VKMAE.Pr.09)'nde belirtilmiştir.

2. SORUMLULUKLAR

İlgili sorumluluklar Numune Kabulü, Dağıtımı ve Muhafazası Prosedür (VKMAE.Pr.09)'nde tanımlanmıştır.

3. NUMUNE ALIMI VE GÖNDERİLMESİ

3.1. At kan örnekleri İl ve İlçelerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı İl ve İlçe Müdürlüklerinde çalışan resmi Veteriner Hekimler, Devlet Haralarında ise TİGEM haralarında çalışan resmi Veteriner Hekimler ve Bakanlıkça teşekkül ettirilen Uzman Heyetler tarafından atın eşkâli dikkatlice kontrol edilerek bizzat alınmalıdır.

3.2. Kan almada kullanılacak tüpler, iğneler ve her türlü malzeme steril ve DNase/RNase free olmalıdır.

3.3. Kan alma esnasında iğnelere kesinlikle dokunulmamalıdır.

3.4. Gerekli hazırlıklardan sonra kan alınacak Vena jugularis'in üzeri alkol ile ıslatılan bir pamuk ile temizlenmelidir.

3.5. Kan her bir at için 1 adet ≈10 ml'lik vakumlu lityum heparinli tüplere alınır. Tüpler üzerine ata ait bilgiler silinmeyecek bir kalemle yazılır.

3.6. DNA analizi için hazırlanmış dilekçe eksiksiz doldurulur. Kan alınış tarihi yazılarak kanı alan Veteriner Hekim tarafından imzalanır. Dilekçe ilgili amire onaylatılır. Üst yazıya analiz ücretinin yattığını gösterir dekont ve dilekçe eklenir. Üst yazı ve gönderilecek numuneler temiz, kırılmayacak ve bozulmayacak bir şekilde paketlenir ve kargoyla laboratuvarımıza gönderilir.

4. NUMUNE KABULU

4.1. Laboratuvara gönderilen kan numuneleri ve ilgili evraklar Numune Kabul Şefliği'nce numune alımı ve gönderilmesinde (3) belirtilen hususlar, kanların yazıda belirtilene göre sayısının eksik olup olmadığının ve bozuk olup olmadığının ön kontrolü yapıldıktan sonra uygun olanlar Numune Kabul Şefliği'nden Genetik Laboratuvar'ına orijinal ambalajı içinde gönderilir.

4.2. Kontroller sonucu evrağı eksik, dilekçenin düzgün doldurulmadığı, dekontun eksik veya olmadığı, yazıda belirtilen sayıda tüp çıkmadığı, uygun tüpte gönderilmediği veya

Hazırlayan
GENETİK LABORATUAR ŞEFİ

Kontrol Eden
KYBB

Onaylayan
ENSTİTÜ MÜDÜRÜ



NUMUNE KABUL TALİMATI

Doküman/Bölüm No:	VKMAE. T.05. GEN
Yayın Tarihi:	03.01.2006
Rev.Tarihi/No:	23.01.2014/05
Sayfa/Top.Sayfa:	2/3

bozuk olduğu durumlarda Numune Kabul Şefliği'nden Genetik laboratuvarına numuneler gönderilmez ve Numune Kabul Şefliği'nce ret tutanağı düzenlenir.

4.3. Genetik Laboratuvarına gelen numunelerin uygun olup olmadığı tekrar kontrol edilir. Uygun olmayanlar reddedilir. Uygun olanlar kabul edilir.

5. UYGULAMALAR

5.1. Laboratuvara gelen numuneler laboratuvar şartlarında analizi yapacak kişi/kişiler tarafından buzdolabına konur.

5.2. Her bir at için DNA numarası verilir. Gönderilen tüplere ve akyuvarların alınacağı eppendorf tüplere bu numaralar yapıştırılır. Kandan Buffy Coat'ları (akyuvarları) DNA numaraları yapıştırılmış eppendorf tüplere alınır ve -80 °C'de muhafaza edilir. Akyuvarlar alındıktan sonra Atık Kontrol Prosedüründe (VKMAE Pr.21) belirtildiği şekilde imha edilirler.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR/ KAYNAKLAR VE EKLER:

VKMAE Pr.03: Kalite Kayıtlarının Kontrolü ve Arşiv Prosedürü

VKMAE Pr.09: Numune Kabulü, Dağıtım ve Muhafazası Prosedürü

VKMAE Pr.21: Atık Kontrol Prosedürü

7. KAYIT KONTROL

İlgili tüm kayıtlar Kalite Kayıtlarının Kontrolü ve Arşiv Prosedürüne (VKMAE Pr.03) göre saklanır.

8. DAĞITIM

Bu talimatın orijinal nüshası Kalite İzleme Biriminde, kontrollü kopyaları ise Genetik laboratuvarı ve Numune Kabul Şefliğinde bulunur.

Hazırlayan
GENETİK LABORATUAR ŞEFİ

Kontrol Eden
KYBB

Onaylayan
ENSTİTÜ MÜDÜRÜ



NUMUNE KABUL TALİMATI

Doküman/Bölüm No:	VKMAE. T.05. GEN
Yayın Tarihi:	03.01.2006
Rev.Tarihi/No:	23.01.2014/05
Sayfa/Top.Sayfa:	3/3

9. REVİZYON

Revizyon No	Tarih	Revizyon Yapılan Madde	Revizyon Nedeni
01	04.02.2008	8. madde	Dağıtımda revizyon
02	25.03.2009	8. madde	Dağıtımda revizyon
03	13.01.2010	3. madde	Bilgi ilavesi
04	09.04.2012	İlgili maddeler	Bakanlığımız ve Kurumumuzun adının 639 sayılı KHK ile değişmesi nedeniyle ilgili kısımlardaki bilgiler güncellenmiştir.
05	23.01.2014	İlgili maddeler	Kalite dokümanlarında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı logosunun kullanılması nedeniyle güncelleme yapılmıştır.

Hazırlayan
GENETİK LABORATUAR ŞEFİ

Kontrol Eden
KYBB

Onaylayan
ENSTİTÜ MÜDÜRÜ